



COVIDIEN


positive results for life™

Appose™ ULC Skin Staplers
Single Use Skin Staplers
with Stainless Steel Staples




APPOSE™ ULC STAPLE SPECIFICATIONS

	Size	Closed Position	Wire
35R	10.87 mm 2.9 mm	5.88 mm 4.1 mm	0.57 mm
35W	13 mm 3.25 mm	6.5 mm 4.1 mm	0.56 mm

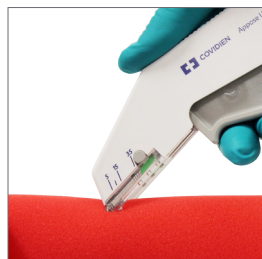

ハンドルを最後までしっかりと握りこみ完全に戻してから、アゴの先端を組織から離してください。

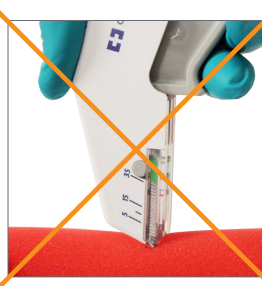

ステープルが組織に打たれるまで、本体を持ち上げたり、前後左右にひねらないでください。

ステンレススティールステープルの組成
ニッケル・クロム含有

特徴

- ステープルの幅が選択可能
- ステープルの高さが選択可能
- 透明なカートリッジ

利点

- 様々な閉創に対応できます
- 整容性を高めます
- ステープルの残数が確認

ApPose™ ULC Single Use Skin Staplerを使用する際の位置決め

ApPose™ ULC Single Use Skin Staplerは様々な角度で使用されることを想定して設計されています。エジェクター・スプリングを内蔵することにより、打針後、自動的にスキンステープラー本体の向きに関わらず、ステープルがアゴ部から放たれます。

ステープルの不形成を防ぐために

正確なステープルを形成するために、ステープルの背面は平坦でくぼみをもつデザインになっています。スキンステープラーを正しく使用するためには、トリガーを完全に握りこんでから戻してください。トリガーを戻す前に、スキンステープラーを引っ張ったり引き上げる行為はお止めください。ハンドルの握りこみ不足は、ステープルの不形成と組織の不十分な寄せ合わせにつながります。

ApPose™ ULC Single Use Skin Staplerのサイズ

ApPose™ ULC Single Use Skin Staplerはレギュラーとワイドの2種類があります。閉鎖後のサイズはそれぞれ、レギュラーステープルが幅5.88mm、高さ4.1mm。ワイドステープルが幅6.5mm、高さ4.1mmとなっています。

ORDER INFORMATION

注文No.	商品名	1箱入数
803512	ApPose™ ULC レギュラー35針入り	12
803712	ApPose™ ULC ワイド35針入り	12

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び“positive results for life”はCovidien AGの商標です。TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。© 2015 Covidien.

販売名：アポーズ ULC 35
医療機器承認番号：22100BZX00117000
クラス：II



製造販売元
コヴィディエン ジャパン株式会社

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2
TEL (03) 5717-1240 FAX (03) 5717-1249