

DST Series™ EEA™ ステープラー

The Most Versatile and Complete Family of Circular Stapling Products

注文No.	商品名	Color	ステーブルサイズ	クラス
 EEA21 EEAXL21	EEA™ 21 サーキュラーステープラー EEA™ 21 XL サーキュラーステープラー	● ●	4.8 4.8	Ⅲ Ⅲ
 EEA2135 EEAXL2135	EEA™ 21-3.5 サーキュラーステープラー EEA™ 21-3.5 XL サーキュラーステープラー	● ●	3.5 3.5	Ⅲ Ⅲ
 EEA25 EEAXL25	EEA™ 25 サーキュラーステープラー EEA™ 25 XL サーキュラーステープラー	○ ○	4.8 4.8	Ⅲ Ⅲ
 EEA2535 EEAXL2535	EEA™ 25-3.5 サーキュラーステープラー EEA™ 25-3.5 XL サーキュラーステープラー	○ ○	3.5 3.5	Ⅲ Ⅲ
 EEA28 EEAXL28	EEA™ 28 サーキュラーステープラー EEA™ 28 XL サーキュラーステープラー	● ●	4.8 4.8	Ⅲ Ⅲ
 EEA2835 EEAXL2835	EEA™ 28-3.5 サーキュラーステープラー EEA™ 28-3.5 XL サーキュラーステープラー	● ●	3.5 3.5	Ⅲ Ⅲ
 EEA31 EEAXL31	EEA™ 31 サーキュラーステープラー EEA™ 31 XL サーキュラーステープラー	● ●	4.8 4.8	Ⅲ Ⅲ
 EEA33 EEAXL33	EEA™ 33 サーキュラーステープラー EEA™ 33 XL サーキュラーステープラー	● ●	4.8 4.8	Ⅲ Ⅲ
 EEAORVIL21*	EEA™ 21 ティルトトップ™ プラス	●	N/A	Ⅲ
 EEAORVIL25*	EEA™ 25 ティルトトップ™ プラス	○	N/A	Ⅲ

*EEAORVIL21はEEA21XL、EEA21-3.5XLと、EEAORVIL25はEEA25XL、EEA25-3.5XLとのみ互換性があります。



製造販売元 コヴィディエン ジャパン株式会社

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2
 東京 (03) 5717-1241 F A X (03) 5717-1249
 札幌 (011) 251-7373 大阪 (06) 6455-8912
 仙台 (022) 213-0550 中四国 (03) 5717-1723
 名古屋 (052) 704-1651 福岡 (092) 263-4700

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び
 "positive results for life" は Covidien AGの商標です。
 TMを付記した商標はCovidien companyの商標です。
 ©2013 Covidien.

販売名:EEA サーキュラーステープラー
 医療機器承認番号:22100BZX00136000

ct-as-ee-eea(09)
 1312.4000.kh.y



DST Series™ EEA™ Stapler Circular Stapler

DST Series™ EEA™ ステープラー

[Stapling Made Smarter]

In Challenging Applications the Difference is DIRECTIONAL STAPLING TECHNOLOGY



21と25は3.5mmのステープルも選択可能
最適な内腔、最適な閉鎖


22cmと35cmの2種類のシャフトの長さを選べます

ディレクショナルステープリングテクノロジー
厚く固い組織に対してもねじれがなく、正確なB型ステープル形成ができます。

音と感触によるフィードバック
使用手順を確認しながら進めていただけます

3.5mmは1.5mmの閉鎖高によって、最適な組織閉鎖を実現
(厚い組織には4.8mmも選択可能)

アンビルのトロカーチップは鋭角と鈍角を選べます
黒いボタンを押すことで簡単にはずせます。先端にスーチャーホールがついています。

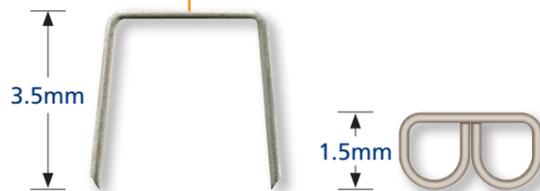

最初から経口アプローチで使用できるように準備されています。
早く、スムーズにそして簡単に。

100cm 18frのデリバリーチューブにより、正確な操作が可能です



ユニークな事前ティルトアンビル
経口アプローチにおいて、組織との接触部位を最小限にします

オービルアンビルの3段階自動ポジショニング

1. 挿入時はティルト
2. 本体と合体後、閉鎖時にはアンティルト
3. 抜去時には再度ティルト

